

Le
Leora



ПРИЛОЖЕНИЕ
К КАТАЛОГУ ЛИНЗ
LEORA

• Быстрый выбор линз • Мастер лист • Разметочные карты •

2 БЫСТРЫЙ ВЫБОР РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ LEORA

	Дизайн	Технологии	Позиционирование	Основная Целевая аудитория	Зрительные потребности
Прогрессивные линзы	Leora Alpha Mobile	Digital Ray-Path®	Персонализированная прогрессивная линза	Требовательные клиенты	Повседневное ношение
	Leora Alpha S45	Digital Ray-Path®	Высококачественная прогрессивная линза	Требовательные клиенты	Повседневное ношение
	Leora Basic S40	Surface Power®	Прогрессивная линза начального уровня	Экономные пациенты	Повседневное ношение
Офисные линзы	Leora Office Reader	Surface Power®	Офисная линза	Офисные сотрудники	Компьютер и офис
Монофокальные линзы	Leora Acomoda	Digital Ray-Path®	Поддержка аккомодации	Офисные сотрудники	Повседневное ношение
	Leora Single Vision AS+	Digital Ray-Path®	Асферическая монофокальная линза с возможностью персонализации	Требовательные молодые пациенты	Повседневное ношение
	Leora RX SV	Surface Power®	Сферическая монофокальная линза	Молодые люди	Повседневное ношение

ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИНЗ УКАЖИТЕ:

ДЛЯ ВСЕХ ЛИНЗ		Монокулярное PD Монокулярные установочные высоты Ширина светового проема Высота светового проема DBL
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Для прогрессивных или офисных	Рецепт на прогрессивные линзы (Даль + ADD)
	Для монофокальных	Рецепт на монофокальные линзы
	Для линз с персонализацией	Пантоскопический угол Лицевой угол Вертексное расстояние
	При нестандартном инсете	PD для чтения

Заказ линз Leora возможен как по диаметру, так и через параметры оптимизации.

MFH (mm)	Персонализация	Far	Near	Comfort
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	✓ (опционально)	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
16, 17, 18, 19, 20	стандартные параметры посадки	★★★★★☆☆	★★★★★★	★★★★★☆☆
16, 18, 20	X	★★★★★	★★★★★	★★★★★
14, 18	X	☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★	★★★★★☆☆
14	✓ (опционально)	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
	✓ (опционально)			
	X			

В линзах Leora с технологией Digital Ray-Path® учитываются стандартные параметры посадки оправы на лице пациента, присущие современным оправам. В случаях с нестандартными параметрами посадки оправы есть возможность указать индивидуальные параметры посадки.

В линзах Leora с технологией Surface Power® параметры посадки на лице не учитываются.


Параметры по умолчанию	Digital Ray-Path®	Surface Power®
Лицевой угол	4-6°	0°
Пантоскопический угол	3-5°	0°
Вертексное расстояние	13-14 мм	13-14 мм

Материал	Опции	Sph Max*	Cyl. Max*	Max ED mm	Add	Prism Max*
Монофокальные линзы						
1.50	Clear, Blue Safe	-12.00/+12.00	-4.00	80		10
	SunMax - photo Grey/Brown			75		
1.50 Polarized	Grey/Grey 50/Brown/Green/Yellow			80		
1.60	Clear, Blue Safe	-14.00/+14.00	-6.00	75		10
	SunMax - photo Grey/Brown/Blue/Green/Pink/Purple					
1.60 Polarized	Grey/Brown/Green/Yellow					
1.67	Clear, Blue Safe	-16.00/+16.00	-8.00	75		10
	SunMax - photo Grey/Brown/Blue/Green/Pink/Purple					
1.67 Polarized	Grey/Brown/Green/Yellow					
Офисные линзы						
1.50	Clear, Blue Safe	-12.00/+12.00	-4.00	80	0.75 to 3.50	10
				75		
1.60				-14.00/+14.00		
1.67	-16.00/+16.00	-8.00	75			
Прогрессивные линзы						
1.50	Clear, Blue Safe	-12.00/+12.00	-4.00	80	0.50 to 3.50	10
	SunMax - photo Grey/Brown			75		
1.60	Clear, Blue Safe			-14.00/+14.00		
1.67	Clear, Blue Safe	-16.00/+16.00	-8.00	75	0.50 to 3.50	10
	SunMax - photo Grey/Brown/Blue/Green/Pink/Purple					
1.74	Clear, Blue Safe					
	SunMax - photo Grey/Brown					

*Возможность заказа за пределами представленного диоптрийного диапазона уточняйте у вашего персонального менеджера.


Поляризационные линзы					
	Эффективность (%)	Светопропускание (%)	1.5	1.6	1.67
Серый (Grey)	99,54	14,70	✓	✓	✓
Серый 50% (Grey-50%)	54,63	52,45	✓		
Коричневый (Brown-15)	99,73	13,65	✓	✓	✓
Зеленый (G-15)	99,72	13,30	✓	✓	✓
Желтый (Y-30)	99,83	34,40	✓	✓	✓

Фотохромные линзы	
1.5	Grey, Brown
1.6	Grey, Brown, Blue, Green, Pink, Purple
1.67	Grey, Brown, Blue, Green, Pink, Purple
1.74	Grey, Brown

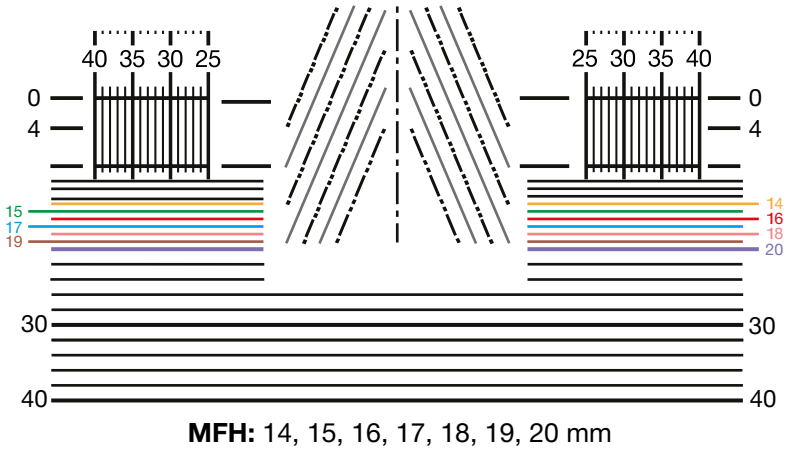


Референтные точки и измерения в линзах Leora

Leora Alpha Mobile, Leora Alpha S45,
Leora Basic S40, Leora Acomoda

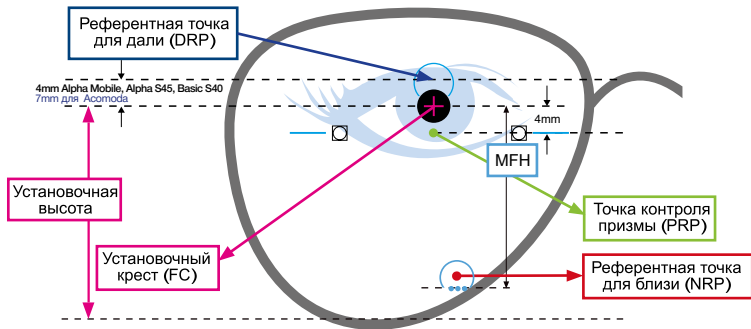



Leora Office Reader

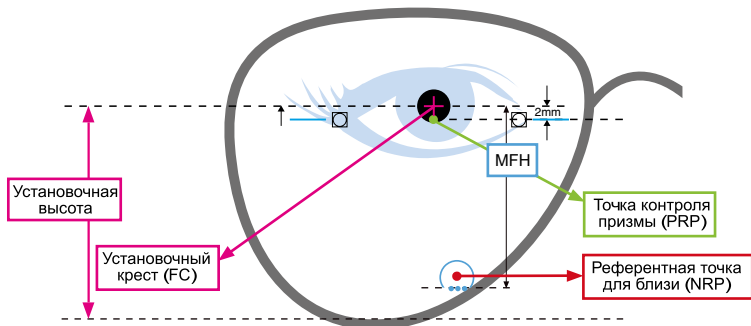

MFH (минимальная установочная высота) - минимальное расстояние от центра зрачка до нижней границы светового проема, рекомендуемое для сборки.



ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Минимальная установочная высота 14, 16, 18, 20 мм

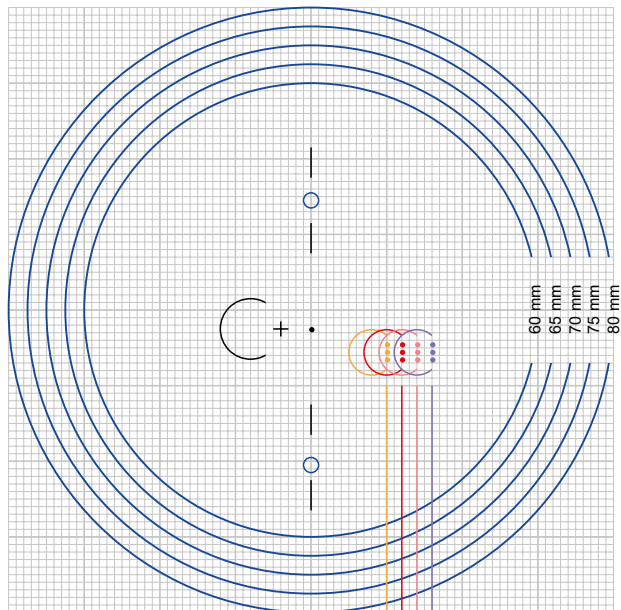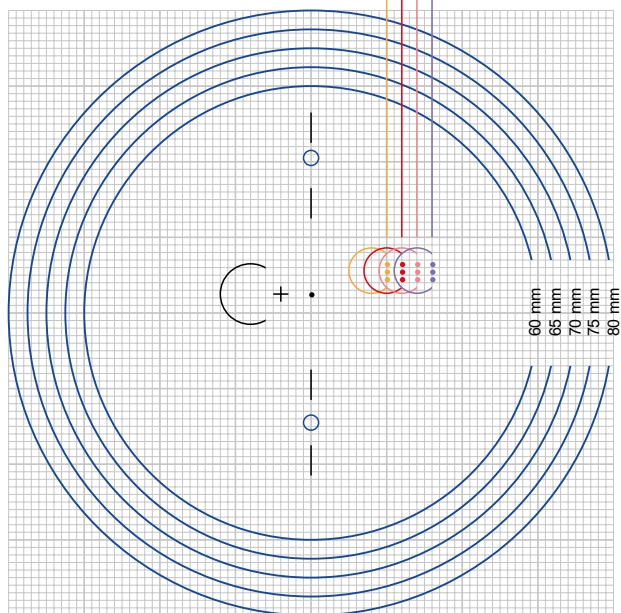



ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Минимальная установочная высота 15, 17, 19 мм

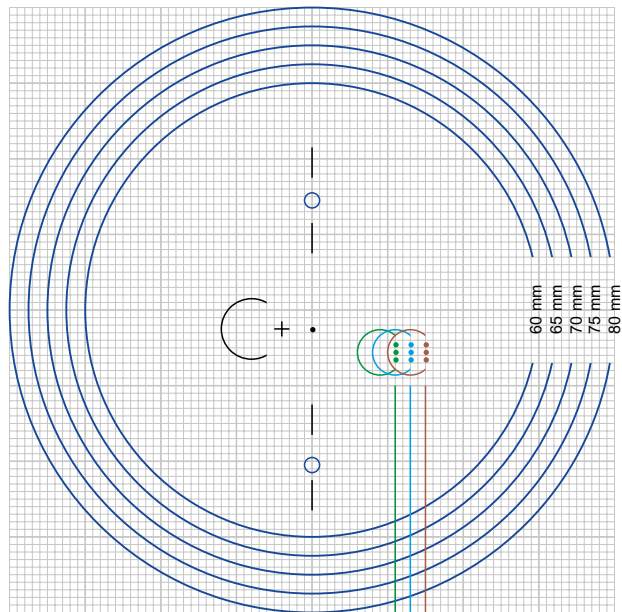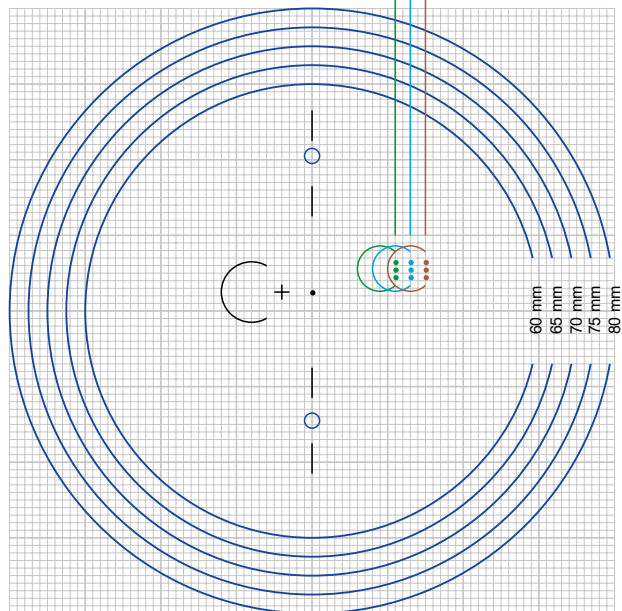



OFFICE READER

Минимальная установочная высота 14, 18 мм

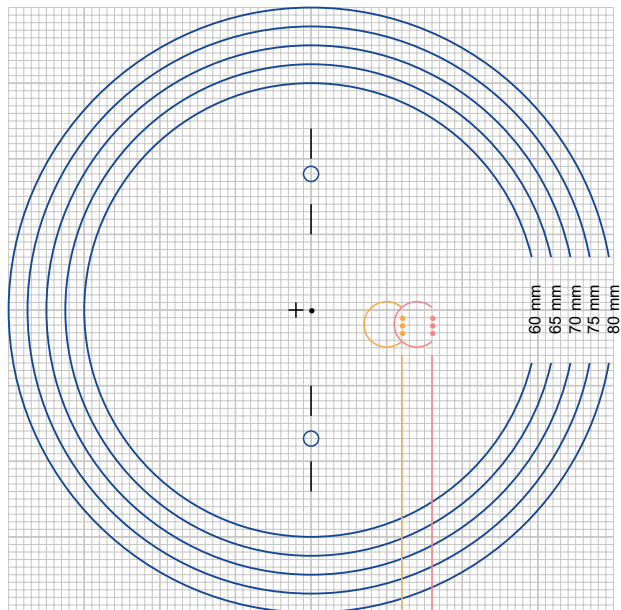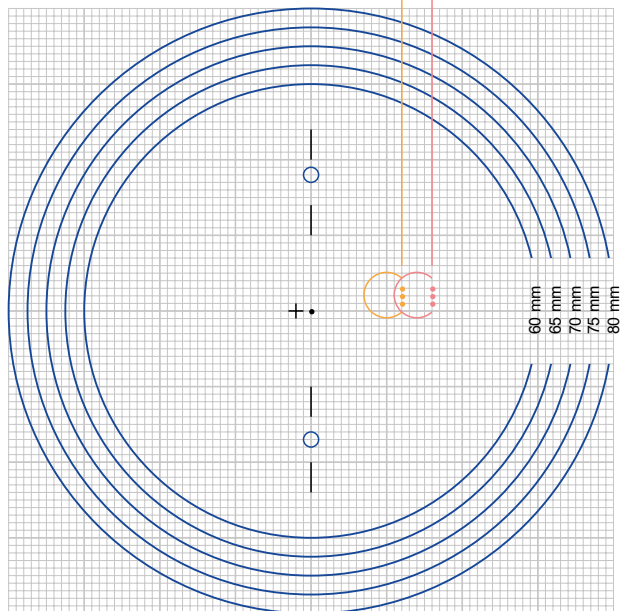

АСОМОДА

Минимальная установочная высота 14 мм

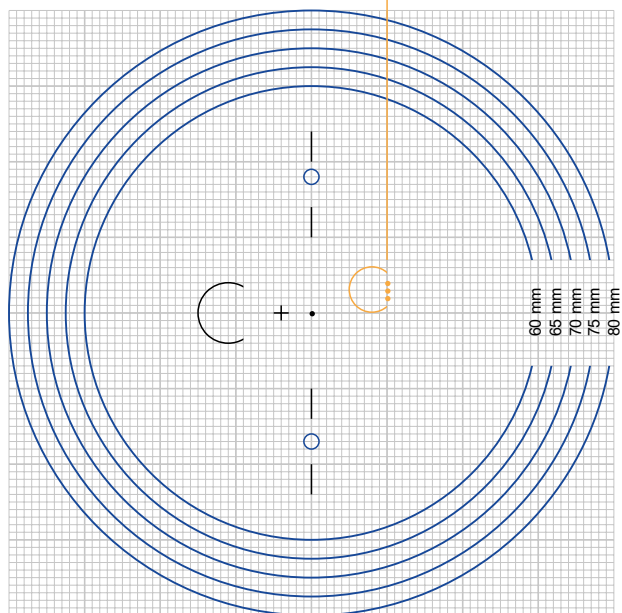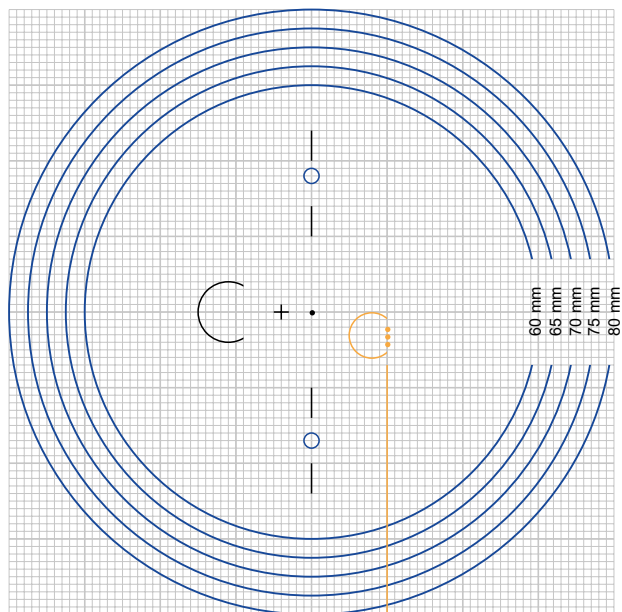



Заказ линз Leora доступен через приложение **Optical Assistance**.

Optical Assistance позволяет безошибочно выбирать линзы, соответствующие потребностям вашего пациента.



● **Онлайн выбор и заказ**
рецептурных линз

● **Онлайн заказ**
складских линз



● **Личный кабинет:**
управление и статистика

● **Расширенная программа лояльности**



QR-CODE ДЛЯ
ПЕРЕХОДА НА СЕРВИС



ССЫЛКИ НА СЕРВИСЫ



Электронный каталог

www.leora.pro



Редакция от 24.01.2025